



MAXi-Tücher

WICHTIG!
Vor Gebrauch stets die
Kennzeichnung und
Produktinformation lesen!
Bitte Abheften!

Einwegtücher für die hygienische Flächendesinfektion

- hygienische Sicherheit
- universelle Praktikabilität
- einfache Handhabung
- zur Tränkung mit allen üblichen Flächendesinfektionsmitteln
- Größe 30x30 cm
- 60g/m²
- 28 Tage Standzeit

Vliestuchrolle:

Die Maxi-Tücher bestehen aus einem 100%-igen Polyestervlies und stellen somit eine optimale Wirkstoffabgabe bei der Anwendung sicher. Zudem sind sie aufgrund der Quervernetzung extrem reißfest und strapazierfähig.

Das Maxi-Tuch Desinfektionsverfahren ist sofort einsetzbar. Jede Vliestuchrolle ist mit einem Chargenetikett versehen, womit Charge, Ansatz- und Verfallsdatum der Desinfektionslösung dokumentiert werden und ein Timestrip Zeitindikator ist vorhanden.

Durch die Einzelblattentnahme aus dem wiederverschließbaren Spendersystem sind die Maxi-Tücher sehr sparsam im Verbrauch.

Anwendungsbereiche:

Die **Maxi-Tücher** können zur Flächendesinfektion und Reinigung von Gegenständen, Oberflächen und in Bereichen ohne Wasseranschluss, in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdiensten und in der Lebensmittelindustrie sowie in Gemeinschaftseinrichtungen angewendet werden.

Anwendung:

1. Handschuhe anlegen
2. Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in gereinigten, desinfizierten, trockenen Feuchttuchspender einsetzen.
3. Die Vliestuchrolle mit der empfohlenen Füllmenge tränken.
4. Vliestuch von unten durch die Entnahmeöffnung führen.
5. Beigefügtes Chargenetikett ausfüllen und aufkleben.



XXL-Tücher:

Art.-Nr.	Gebindegrößen:
pd810	70 Stück/Rolle
pe0010	3,4 Liter Eimer

XXXL-Tücher:

Art.-Nr.	Gebindegrößen:
pd830	90 Stück/Rolle
pe0020	5,6 Liter Eimer