

## Absauganlagenreinigung

**Flüssigkonzentrat zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung und Pflege zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider.**



- *Ergänzungspräparat mit speziellem Eiweißlöser, erhält die volle Saugleistung des Systems selbst bei hoher Belastung, z. B. nach chirurgischen Eingriffen*
- *sollte mindestens an 2 Tagen pro Woche (z. B. Montag + Dienstag) eingesetzt werden, um etwaige Rückstände aufzuspalten, zu lösen und wegzuspülen*
- *löst Kalk (saurer pH-Wert), neutralisiert Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) und Natriumbicarbonat (aus Airflow)*
- *frei von Phenolen, Aldehyden, Phosphaten und Chlor*
- *löst nach wissenschaftlichen Untersuchungen sogar weniger Quecksilber aus abgedehntem Amalgam als Leitungswasser*



CE

### Zusammensetzung

Amidosulfonsäure, Tenside, Hilfsstoffe

### Wirkungsspektrum

- *reinigend und pflegend*
- *löst Bicarbonat*

### Anwendungskonzentration

5 %ige Gebrauchslösung mit warmem Wasser (ca. 40 – 50°C)  
(bei stärkerer Verschmutzung bis 10 %)

### Anwendungsgebiet

Flüssigkonzentrat zur wöchentlichen sauren Kontrareinigung und Pflege von Absaug- und Abscheideanlagen mit und ohne Amalgamabscheider.

### Anwendung

Für die zuverlässige Reinigung und Pflege wird empfohlen, AlproJet-W an 2 Tagen in der Woche jeweils 1 – 2 mal (mittags, abends) anstelle von AlproJet-D oder AlproJet-DD

anzuwenden. Bei starker Proteinbelastung ist vorübergehend auch eine tägliche Anwendung mit AlproJet-W möglich.

Für eine Anwendung werden 2 L einer 5 %igen Gebrauchslösung benötigt. Dazu über die Dosierkammer der Dosierflasche 2 x 50 ml AlproJet-W Konzentrat dosieren und im AlproJet MixCup mit 40 – 50 °C warmem Wasser zu 2 L Gebrauchslösung auffüllen. Anschließend 1 L Gebrauchslösung durch die Saugschläuche einsaugen und den restlichen 1 L in die Speischale geben. Danach für mindestens 30 Minuten einwirken lassen und die Saugschläuche und die Speischale erst vor Arbeitsbeginn gut mit Wasser nachspülen.

**Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal.**

### Haltbarkeit

4 Jahre

### Materialverträglichkeit/-freigabe

Von namenhaften Dentalgeräteherstellern hinsichtlich der Materialverträglichkeit an Dental-einheiten getestet und zur Anwendung freigegeben. Aufgrund der Materialverträglichkeit kann/darf AlproJet-W über Nacht und/oder das Wochenende in der Dentaleinheit verwendet werden.

## Absauganlagenreinigung

### Umwelt

AlproJet-W enthält weder Chlor noch Sauerstoffabspalter und ist aldehyd- und phenolfrei. Die enthaltenen Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar. Die Gebrauchslösung ist ökologisch unbedenklich.

### Lieferformen

REF 3106	1 L Dosierflasche
REF 3105	5 L Kanister
REF 3108	10 L Kanister

### Zubehör

REF 3085	AlproJet MixCup
REF 4010	Auslaufhahn
REF 4011	Dosierpumpe
REF 4012	Kanisterschlüssel
REF 3125-N	AlproJet-DD StarterSet
REF 3124	AlproJet-D StarterSet