

Oberflächendesinfektion

Stand: 20.05.2021

**Alkoholische gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte.**

- aldehyd- und phenolfrei
- angenehm frisch im Duft
- mit Remanenzwirkung/ Konservierung (Hemmung der Neuverkeimung nach Abtrocknung)
- VAH/DGHM zertifiziert



CE 0123

### Zusammensetzung

100 g enthalten:  
 45 g Ethanol, 15 g Isopropanol,  
 0,1 g Chlorhexidindigluconat,  
 0,08 g Trialkylethoxyammoniumpropionat,  
 0,05 g Alkylaminderivate

### Wirkungsspektrum

- bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe
- levurozid
- begrenzt viruzid PLUS\* = viruzid/ low level im DVV carriertest, 2012 gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren, sowie alle behüllten Viren, z.B. HBV, HCV, HIV, Influenza sowie Coronaviren
- mit Remanenzwirkung (Hemmung der Neuverkeimung)
- VAH/DGHM zertifiziert - Flächendesinfektion

### Einwirkzeiten (unverdünnt)

Testkriterien: Hohe Belastung, Raumtemperatur:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| bakterizid<br>(EN 13727, EN 16615, EN 14561) | 2 Min. |
| MRSA<br>(VAH-Methode 9)                      | 1 Min. |
| levurozid<br>(EN 13624, EN 16615, EN 14562)  | 2 Min. |
| tuberkulozid<br>(EN 14348)                   | 1 Min. |

Testkriterien: geringe Belastung Raumtemperatur:

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| begrenzt viruzid PLUS*<br>(EN 14476, EN 16777) | 2 Min. |
| viruzid low level<br>(DVV 2012)                | 2 Min. |

Testkriterien: Ohne Belastung, Raumtemperatur:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| begrenzt viruzid<br>(RKI/DVV, behüllte Viren) | 30 Sek. |
|-----------------------------------------------|---------|

Vorreinigung: gemäß RKI-Empfehlung sollten stark verschmutzte Oberflächen vorgereinigt werden (Test mit geringer bzw. ohne Belastung)

### Gutachten

- Dr. H. Brill, Hamburg, MRSA, 2009-07; EN 14561 + EN 14562, 2009-06; Langzeit/ Remanenz inkl. EN 13697, 2008-01
- Prof. Dr. P. Heeg, Tübingen, DGHM, 1999-03
- Dr. J. Höffler, Hamburg, EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04
- Prof. DDr. E. Marth, Graz, DGHM, 2002-07
- Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt/M., VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05
- Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, VAH, EN 16615, 4-Felder Test, 2016-06, EN 13624 + EN 13727 + EN 14476, 2017-08; TB EN 14348, 2019-06
- Dr. J. Steinmann, Bremen, Adeno, 2006-03; Vaccinia, 2006-05; BVDV, 2003-11  
Virusinaktivierend: behüllte Viren z.B. HBV, HCV, HIV, Influenza, 2009-08; 2014-05
- Prof. Dr. H.-P. Werner, HygCen, Schwerin, VAH, 2009-09; Viruzidie (DVV Carriertest, 2012), 2013-11
- PD Dr. M. Eggers, Stuttgart, Wirksamkeit gegen Adenovirus, EN 14476, 2019-07; Wirksamkeit gegen Norovirus, EN 14476, 2019-07; Wirksamkeit gegen Adenovirus, EN 16777, 2019-07; Wirksamkeit gegen Norovirus, EN 1677, 2019-07
- PD Dr. F.-A. Pitten, Giessen, EN 16615, 2019-10; EN 16615, 2019-11

*Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.*

\* Neue viruzide Wirksamkeitsstufe 2017 zur prophylaktischen Flächendesinfektion. „Bei Risiko der Weiterverbreitung von unbehüllten Viren sind in Abhängigkeit von der Virusspezies begrenzt viruzid PLUS oder viruzide Flächendesinfektion einzusetzen.“

Oberflächendesinfektion

Stand: 20.05.2021

## Anwendungsgebiet

MinutenSpray-*classic* dient zur schnellen Wisch- und Sprühdesinfektion, sowie Reinigung von Oberflächen von Medizinprodukten, z.B. Schwebetischen, Unitgriffen, medizinischen Geräten, Bedienungstasten, Hand- und Winkelstücken, Turbinen etc.

Anwendung nur auf alkoholverträglichen Oberflächen!

## Haltbarkeit

3 Jahre

## Anwendung

Zu desinfizierende Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung vollständig benetzend einsprühen und gemäß Wirkungsspektrum einwirken lassen.

Anschließend mit einem Einmaltuch (z.B. MinutenWipes) abwischen.

Nur bei alkoholverträglichen Oberflächen anwenden.

**Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.**

## Freigaben

Werksfreigabe u. a. von Dentsply Sirona, Planmeca

## Umwelt

Um Verpackungsrohstoffe einzusparen und die Umwelt zu schonen, empfehlen wir zum Nachfüllen den 5 Liter Cubitainer zu verwenden.

## Materialverträglichkeit

Nur auf alkoholverträglichen Oberflächen anwenden.

## Lieferformen

|          |                      |
|----------|----------------------|
| REF 3006 | 500 ml Spritzflasche |
| REF 3005 | 5 L Kanister         |
| REF 3007 | 5 L Cubitainer       |

## Zubehör

|          |                     |
|----------|---------------------|
| REF 4010 | Auslaufhahn         |
| REF 3094 | Cubihahn            |
| REF 4011 | Dosierpumpe         |
| REF 4012 | Kanisterschlüssel   |
| REF 3097 | Cubitainerschlüssel |
| REF 3089 | Sprühkopf           |