


Oberflächenreinigung und -desinfektion

Stand: 20.05.2021

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte.

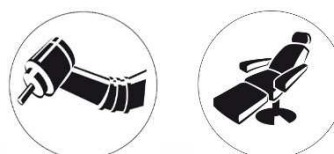

- aldehyd- und phenolfrei
- frisch im Duft (Citrus)
- sehr schnelle Wirkung
- gebrauchsfertig
- fusselfrei



CE 0123

Zusammensetzung

100 g Wirkstofflösung enthalten:
45 g Ethanol, 15 g Propan-2-ol,
0,1 g Chlorhexidindigluconat,
0,08 g Trialkylethoxyammoniumpropionat,
0,05 g Alkylaminderivate

Wirkungsspektrum (Wirkstofflösung)

- bakterizid inkl. TBC, MRSA und geeignet zur Hospitalismusprophylaxe
- levurozid
- begrenzt viruzid PLUS* = low level viruzid im DVV carriertest, 2012 gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren, sowie alle behüllten Viren wie z.B. HBV, HCV, HIV, Influenza sowie Coronaviren
- VAH/DGHM zertifiziert – Flächendesinfektion

Einwirkzeiten

Testkriterien: hohe Belastung, Raumtemperatur:

bakterizid
(EN 13727, EN 16615, EN 14561) 2 Min.

MRSA
(VAH-Methode 9) 1 Min.

levurozid
(EN 13624, EN 16615, EN 14562) 2 Min.

tuberkulozid
(EN 14348) 1 Min.

Testkriterien: geringe Belastung, Raumtemperatur:

begrenzt viruzid PLUS
(EN 14476, EN 16777) 2 Min.

viruzid low level
(DVV 2012) 2 Min.

Testkriterien: ohne Belastung, Raumtemperatur:

begrenzt viruzid
(RKI/DVV, behüllte Viren) 30 Sek.

Vorreinigung: gemäß RKI-Empfehlung sollten stark verschmutzte Oberflächen vorgereinigt werden (Test mit geringer bzw. ohne Belastung)

Gutachten

- Dr. H. Brill, Hamburg, MRSA, 2009-07; EN 14561 + EN 14562, 2009-06, Langzeit/Remanenz inkl. EN 13697, 2008-01
- Prof. Dr. P. Heeg, Tübingen, DGHM, 1999-03
- Dr. J. Höffler, Hamburg, EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04
- Prof. DDr. E. Marth, Graz, DGHM, 2002-07
- Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt/M., VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05
- Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, VAH, EN 16615, 4-Felder Test, EN 13624 + EN 13727 + EN 14476, 2017-08; TB EN 14348, 2019-06
- Dr. J. Steinmann, Bremen, Adeno, 2006-03; Vaccinia, 2006-05; BVDV, 2003-11, Virusinaktivierend: behüllte Viren wie z.B. HBV, HCV, HIV, Influenza, 2009-08; 2014-05
- Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, VAH, 2009-09; Viruzidie (DVV Carriertest, 2012), 2013-11
- PD Dr. M. Eggers, Stuttgart, Wirksamkeit gegen Adenovirus, EN 14476, 2019-07; Wirksamkeit gegen Norovirus, EN 14476, 2019-07; Wirksamkeit gegen Adenovirus, EN 16777, 2019-07; Wirksamkeit gegen Norovirus, EN 16777, 2019-07
- PD Dr. F.-A. Pitten, Giessen, EN 16615, 2019-10; EN 16615, 2019-11

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.

* Neue viruzide Wirksamkeitsstufe 2017 zur prophylaktischen Flächendesinfektion. „Bei Risiko der Weiterverbreitung von unbehüllten Viren sind in Abhängigkeit von der Virusspezies begrenzt viruzid PLUS oder viruzide Flächendesinfektion einzusetzen.“

Oberflächenreinigung und -desinfektion

Stand: 20.05.2021

Anwendungsgebiet

MinutenWipes dienen zur schnellen Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, Schwebetischen, Unitgriffen, medizinischen Geräten, Bedienungstasten, Hand- und Winkelstücken, Turbinen etc.

Anwendung nur auf alkoholverträglichen Oberflächen!

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

Haltbarkeit

2 Jahre

MinutenWipes FP sind 18 Monate haltbar.

Nach dem Öffnen können die MinutenWipes bei ordnungsgemäßem Verschluss nach vorschriftsmäßigem Gebrauch mindestens 1 Monat angewendet werden.

Freigaben

Werksfreigabe u. a. von Dentsply Sirona, Planmeca

Materialverträglichkeit

Nur auf alkoholverträglichen Oberflächen anwenden.

Lieferformen**MinutenWipes FP**

„cotton touch“ Qualität

REF 4746 FlowPack à 40 Tücher
(50g/m², 21 x 26 cm)

MinutenWipes 30

„cotton style“ Qualität

REF 3050 StarterSet à 2 Spenderboxen,
leer und 2 NF-Beutel à
60 Tücher
(30 g/m², 14 x 20 cm)

REF 3051 Karton à 6 Nachfüllbeutel
à 60 Tücher
(30 g/m², 14 x 20 cm)

MinutenWipes Jumbo 30

„cotton style“ Qualität

REF 3052 StarterSet à 2 Spenderboxen,
leer und 2 NF-Beutel à
100 Tücher
(30 g/m², 21 x 26 cm)

REF 3053 Karton à 12 Nachfüllbeutel
à 100 Tücher
(30 g/m², 21 x 26 cm)

MinutenWipes 50

„cotton touch“ Qualität

REF 4709 StarterSet à 2 Spenderboxen,
leer und 2 NF-Beutel à
40 Tücher
(50 g/m², 14 x 20 cm)

REF 4710 Karton à 6 Nachfüllbeutel
à 40 Tücher
(50 g/m², 14 x 20 cm)

MinutenWipes Jumbo 50

„cotton touch“ Qualität

REF 4713 StarterSet à 2 Spenderboxen,
leer und 2 NF-Beutel à
70 Tücher
(50 g/m², 21 x 26 cm)

REF 4712 Karton à 12 Nachfüllbeutel
à 70 Tücher
(50 g/m², 21 x 26 cm)

MinutenWipes Maxi

„cotton touch“ Qualität

REF 4747 StarterSet à 1 Spenderbox,
leer und 1 NF-Beutel

REF 4714 Karton à 4 Nachfüllbeutel
à 250 Tücher
(50 g/m², 17 x 26 cm)

Zubehör

REF 4602 Wandhalter
(runde Spenderboxen) für
JumboWipes 50

REF 4603 Wandhalter
(eckige Spenderboxen) für
MaxiWipes

REF 4690 Deckel eckig, für MaxiWipes
Spenderbox