

Maschinelle Aufbereitung

Stand: 12.03.2021

Flüssigkonzentrat zur Neutralisation nach der alkalischen Reinigung im RDG.

- ist ein saures Reinigungs- und Neutralisationsprodukt
- entfernt Anlauffarben und säurelösliche Verunreinigung
- korrosionsverhindernd

Zusammensetzung

Enthält: 50 – 70 % Phosphorsäure (7664-38-2)

Wirkungsspektrum

- Neutralisierend
- Korrosionsverhindernd

Wirkstoffbasis

Universell einsetzbare Neutralisationslösung für alle alkalischen Reinigungszertifikate auf Basis Phosphorsäure.

Anwendungsgebiet

Neutralisationskomponente auf Phosphorsäurebasis für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten während der thermischen Aufbereitung im Vario TD-Programm oder RKI-Verfahren zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung.

Auch geeignet zur Grundreinigung von Dental-Instrumenten (als Tauchbad).

Dosieranleitung

1 – 3 ml/l, automatisch über die Dosierpumpe des Thermodesinfektionsautomaten.

Zur Reinigung im Einlegeverfahren kaltes Wasser vorlegen, 1 – 3 % TR-Neutralizer zugeben und anschließend die Instrumente einlegen. Einlegezeit max. 1 Stunde. Danach gründlich mit Wasser abwaschen.

Die Gebrauchslösung ist nur einmal verwendbar.



Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal

Haltbarkeit

4 ½ Jahre

Materialverträglichkeit

Ist sehr gut verträglich und kann für alle in der Dentalpraxis üblichen Objekte aus Keramik, Edelstahl und säurefesten Kunststoffen verwendet werden (Buntmetalle, verchromte und vernickelte Teile können angegriffen werden)

Freigaben

Geprüft u.a. für Miele Professional G 7735, G 7781, G 7881, SIROCLEAN, MELAtherm

Lieferformen

REF 3710 5 L Kanister gerätekompabil für Anschluss mit Dosierlanze (RDG)