

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 08.12.2020

Die Ausblasvorrichtung WL-Blow mit integriertem Luftmengenbegrenzer dient zum Ausblasen, Trocknen und zur Reinigungsunterstützung nach der Anwendung von WL-clean/ WL-cid (Reinigung/ Desinfektion) an Innenflächen von Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.* WL-Blow dient ausschließlich der Anwendung im Aufbereitungsraum, es kann an die vorhandene ölfreie Trockenluftanlage angeschlossen werden!**

- *trocknend*
- *reinigungsunterstützend*

Anwendungsgebiet

Entfernen von Reinigungs-/Desinfektions- und Pflegemittelrückständen in Hohlkörper- und Übertragungsinstrumenten.

Anwendung

Nach der Anwendung mit WL-clean/WL-cid für 3 Sekunden anwenden, danach ist nach Herstellervorgaben zu pflegen/ölen. Vorgang ggf. wiederholen.


Anwendung nur durch Fachpersonal.

Lieferformen

- | | |
|----------|---|
| REF 4160 | WL-Blow Set bestehend aus:
1 x Druckluftpistole (blau)
1 x Schlauchnippel G ¼" für
Druckschlauch, PE 8 x 6 x 1 mm
2 x Luftmengenbegrenzer |
| REF 4144 | WL-Blow StarterSet
2 x WL-clean
2 x WL-cid
1 x WL-Blow
1 x Gebrauchsanweisung |

Zubehör

- | | |
|----------|---------------------|
| REF 4162 | Luftmengenbegrenzer |
|----------|---------------------|

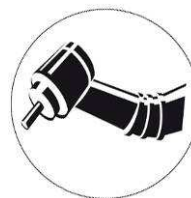

* Bitte Herstellerfreigaben beachten!

** Es wird der Anschluss eines Bakterienfilters empfohlen!