



## SCHNELLE ALKOHOLISCHE DESINFEKTION

### Incidin™ Liquid

#### GEBRAUCHSFERTIGE FLÄCHENDESINFEKTION AUF ALKOHOLBASIS

Incidin™ Liquid bietet dem Anwender durch sein breites Wirkspektrum auch bei Tuberkulose und Noroviren eine hohe Sicherheit.

Incidin™ Liquid bietet auch:

- Kurze Einwirkzeit
- Formulierung ohne Farbstoffe und Duftstoffe
- Hervorragende Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen
- Kompatibilität mit dem Incidin Tuchsystem



# Incidin™ Liquid

## GEBRAUCHSFERTIGE FLÄCHENDESINFEKTION AUF ALKOHOLBASIS

### BREITES WIRKSPEKTRUM BEI KURZEN EINWIRKZEITEN

Aufgrund seines breiten Wirkspektrums bei kurzen Einwirkzeiten eignet sich Incidin Liquid auch für den Intensivbereich und andere Hochrisikobereiche. Die Einwirkzeiten sind in der untenstehenden Tabelle angeführt.

### ZUVERLÄSSIGER EINSATZ

Incidin Liquid ist gebrauchsfertig und bietet nachgewiesene Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen, somit ist ein zuverlässiger Einsatz für alle Anwendungsbereiche gewährleistet.

### FREI VON FARB- UND DUFTSTOFFEN

Die farbstoff- und parfümfreie Formulierung hinterlässt keine aktiven Rückstände und sorgt für eine angenehme Produktanwendung.

### MIKROBIOLOGISCHE UND VIROLOGISCHE TESTERGEBNISSE

WIRKSAMKEIT UNVERDÜNNT	KONTAKTZEIT
Desinfektion von Flächen nach VAH-Methode 2015 mit/ohne mechanischer Wirkung (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 Min.
Bakterizid gemäß EN 13727 (30 Sek.) / EN 16615 (1 Min.)	1 Min.**
Levurozid gemäß EN 13624 (30 Sek.) / EN 16615 (1 Min.)	1 Min.**
Tuberkulozid gemäß EN 14348 / EN 16615 (Methode)	1 Min.**
Wirksam gegen behüllte Viren gemäß EN 14476	30 Sek.**
Begrenztes viruzides Spektrum gemäß EN 14476 (Adenovirus – 1 Min., Norovirus – 30 Sek.)	1 Min.**
Begrenztes viruzides Spektrum gemäß RKI-Empfehlung 10/2022	10 Min.***
Wirksam gegen behüllte Viren gemäß RKI-Empfehlung 10/2022	30 Sek.***
Aktiv gegen Rotaviren nach DVV 2015	30 Sek.***

\* hohe Belastung \*\* geringe Belastung \*\*\* DVV 2015 (Suspensionstest)

### VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Liquid Sprühflasche	12 x 1 L	3096220
Incidin™ Liquid Kanister	2 x 5 L	3096300

### MEDIZINPRODUKTE UND BIOZIDE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie vor Gebrauch das Etikett und die Produktinformationen.

### ANWENDUNGSBEREICH



**Medizinprodukt:** Gebrauchsfertige Desinfektionsflüssigkeit für nicht-invasive Medizinprodukte.

**Biozid:** Für allgemeine Oberflächen.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### 1L in Sprühflasche:

Reinigen Sie die Oberfläche im Voraus. Aus einem Abstand von ca. 30 cm aufsprühen, mit einem sauberen Tuch über die Oberfläche wischen und trocknen lassen. Alternativ tragen Sie das Produkt auf ein sauberes Tuch auf, wischen Sie die Oberfläche vollständig ab und lassen diese trocknen. Beachten Sie die angegebene Einwirkzeit für die erforderliche antimikrobielle Wirkung.

Medizinprodukt: Spülen ist nicht erforderlich, es sei denn, die zu behandelnden Bereiche sollen mit Haut oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Medizinprodukt Herstellers zur Reinigung und Desinfektion. Vor Gebrauch die Verträglichkeit auf alkoholempfindlichen Oberflächen prüfen.

#### 5L Kanister:

Reinigen Sie zuvor die Oberfläche. Tragen Sie das Produkt auf ein sauberes Tuch auf, z.B: Incidin Tuchsystem (ausführliche Anweisungen zur Vorbereitung der Trockentücher finden Sie auf deren Verpackung), wischen Sie die Oberfläche vollständig ab und lassen Sie diese trocknen. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vollständig benetzt ist. Beachten Sie die angegebene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Wirkung.

Medizinprodukt: Spülen ist nicht erforderlich, es sei denn, die zu behandelnden Bereiche sollen mit Haut oder Schleimhäuten in Kontakt kommen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Medizinprodukt Herstellers zur Reinigung und Desinfektion. Vor Gebrauch die Verträglichkeit auf alkoholempfindlichen Oberflächen prüfen.

### INHALTSSTOFFE

100g enthalten: 35g Propan-2-ol (CAS N° 67-63-0), 25g Propan-1-ol (CAS N° 71-23-8).

### LAGERUNG

Das Produkt sollte im Originalbehälter bei 0°C bis 25°C an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Vertrieb durch:

**ECOLAB GMBH**

Rivergate D1/4.OG  
Handelskai 92  
1200 Wien  
Österreich



**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB®**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™