

Produktinformation

Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat



Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat auf einen Blick

- Einteiliges Entwicklerkonzentrat zur Entwicklung von grünempfindlichen Röntgenfilmen in Rollenentwicklungsmaschinen von Dürr Dental.
- Frei von Hydrochinon und Aldehyden.
- Einfach in der Anwendung: Einfüllen – verdünnen – fertig.

Eigenschaften

Das Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat ist ein spezieller Entwickler für die Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II, XR 24 von Dürr Dental. Der Automat XR/C⁺ Entwickler hat die Aufgabe, das durch Röntgenstrahlen oder Licht erzeugte, latente Bild auf dem Röntgenfilm sichtbar zu machen. Hierbei werden die belichteten Silberbromidkristalle durch organische Entwicklersubstanzen zu metallischem Silber reduziert; dies ergibt die Filmschwärzung.

Produktzusammensetzung

Das Dürr Dental Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat ist alkalisch und enthält Ascorbinsäure und Dimezone S als Entwicklersubstanzen, Kaliumsulfat als Oxidationsschutz sowie Komplexbildner, Carbonate, Stabilisatoren und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

Anwendung

Das Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat wird als einteiliges Konzentrat geliefert. Der Ansatz der Gebrauchslösung muss entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgen. Ein Ansatz ergibt 5 l gebrauchsfertige Entwicklerlösung.

Umweltverhalten

Gebrauchte Entwicklerbäder sind entsprechend den jeweils örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen (Abfallschlüssel: EAK 090101). Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit

Produkt nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Gebrauchslösung:

Bei Verwendung in XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II, XR 24: 4 Wochen (bei täglich 10 intra- und 3 extraoralen Röntgenfilmen ohne Regenerierung). 3 Monate (bei täglich mehr als 10 intra- und 3 extraoralen Röntgenfilmen mit automatischer Regenerierung).

Packungsgröße

Set mit:

2 x 1,5 l-Flasche Entwicklerkonzentrat

2 x 1,5 l-Flasche Fixierkonzentrat

Einteilige Konzentrate für 2 Ansätze (ergeben 2 x 5 l Entwickler- und 2 x 5 l Fixierer-Gebrauchslösung)

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlos-

Produktinformation

Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat

sen halten.

Allgemeine Hinweise

Automat XR/C⁺ nicht mit anderen Produkten mischen. Dies führt zu Verlust der Produktleistung. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

Zubehör

WR 2000 Sprühreiniger

Gefahrenhinweise

Automat XR/C⁺ Entwicklerkonzentrat ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

pH-Wert: 10,5 – 11,4



Vertrieb

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrendental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.com