

Produktinformation

Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat



Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat auf einen Blick

- Einteiliges Fixierkonzentrat zur Fixage von intra- und extraoralen Röntgenfilmen in Rollenentwicklungsmaschinen von Dürr Dental.
- Sichere Archivierung.
- Einfache Anwendung: Einfüllen – verdünnen – fertig.

Eigenschaften

Das Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat ist ein spezieller, optimierter Fixierer für die Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II, XR 24 von Dürr Dental. Der Automat XR/C⁺ Fixierer hat die Aufgabe, nicht reduziertes Silberbromid aus dem Film zu entfernen. Weiterhin muss das Fixierbad durch geeignete Puffersubstanzen einen stets konstanten pH-Wert garantieren, auch wenn mit dem Film gewisse Entwicklungsmengen eingeschleppt werden. Die dritte Aufgabe besteht in der Härtung der Filmgelatineschicht, damit keine Ablösung von der Trägersubstanz erfolgt.

Produktzusammensetzung

Das Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat ist schwach sauer und enthält Ammoniumthiosulfat zur Fixage, Natriumsulfit als Oxidationsschutz, organische Säuren und Hilfsstoffe in wässriger Lösung.

Anwendung

Das Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat wird als einteiliges Konzentrat geliefert. Der Ansatz der Gebrauchslösung muss entsprechend der Gebrauchsanweisung erfolgen. Ein Ansatz ergibt 5 l gebrauchsfertige Fixierlösung.

Umweltverhalten

Gebrauchte Fixierbäder sind entsprechend den jeweils örtlich geltenden Bestimmungen zu entsorgen (Abfallschlüssel: EAK 090104). Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Haltbarkeit

Produkt nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Gebrauchslösung:

Bei Verwendung in XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24 II, XR 24:
4 Wochen (bei täglich 10 intra- und 3 extraoralen Röntgenfilmen ohne Regenerierung). 3 Monate (bei täglich mehr als 10 intra- und 3 extraoralen Röntgenfilmen mit automatischer Regenerierung).

Packungsgröße

Set mit:

2 x 1,5 l-Flasche Entwicklerkonzentrat

2 x 1,5 l-Flasche Fixierkonzentrat

Einteilige Konzentrate für 2 Ansätze (ergeben 2 x 5 l Entwickler- und 2 x 5 l Fixierer-Gebrauchslösung)

Produktinformation

Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat

Lagerung

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Allgemeine Hinweise

Automat XR/C⁺ nicht mit anderen Produkten mischen. Dies führt zu Verlust der Produktleistung. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorkommnisse sind umgehend dem Hersteller und der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaats zu melden.

Zubehör

WR 2000 Sprühreiniger

Gefahrenhinweise

Automat XR/C⁺ Fixierkonzentrat ist nach CLP-Verordnung eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

pH-Wert: 4,5 - 5,5



Vertrieb

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrendental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.com