

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung

**Betrieb:**  
**Bereich/Tätigkeit:** Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion

Datum: 2018-01

## Gefahrstoffbezeichnung

### DÜRR SYSTEM-HYGIENE ID 212 forte Instrumentendesinfektion

**Gefahrenauslöser:** 3-Aminopropyl -dodecyl-1,3-propandiamin  
Alkyl-dimethyl-benzyl-ammoniumchlorid

**Vertrieb:** DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen  
Tel-Nr. 07142 705-0 Fax-Nr.: 07142 705-500

**Hersteller:** orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D-70806  
Kornwestheim  
Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

**Notfallauskunft:** 030 30686790 Giftnotruf Berlin

## Gefahren für Mensch und Umwelt



**Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.**

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar, größere Mengen des Konzentrates nicht in Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



**Technisch:** Flasche mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

**Persönlich:** Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

**Beschränkungen:** Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

## Verhalten im Gefahrenfall



**Nach Verschütten/Auslaufen:** Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**Feuer:** Bei Brand vorhandene Feuerlöscher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen **(112)**.

**Löschmittel:** Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:** keine bekannt

## Erste Hilfe



**Allgemeine Hinweise:** Benetzte Kleidung wechseln.

**Nach Einatmen:** Bei auftretender Reizung für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

**Notruf: 112**

**Notarzt/Rettungsdienst:**

## Sachgerechte Entsorgung

### Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 18 01 06\* (Desinfektionsmittel)

### Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.