

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Röntgenfilmentwicklung

Datum: 2020-05

Gefahrstoffbezeichnung

AUTOMAT XR/C+ Fixierkonzentrat

Vertrieb: DÜRR DENTAL SE, Höpfigheimer Str. 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel-Nr.: 07142 705-0 Fax-Nr.: 07142 705-500

Hersteller: orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D-70806
Kornwestheim
Tel-Nr.: 07154 1308-0 Fax-Nr.: 07154 1308-40

Notfallauskunft: 030 30686790 Giftnotruf Berlin

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein Gefahrstoff

Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technisch: Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Persönlich: Empfehlung: Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

Beschränkungen: keine

Verhalten im Gefahrenfall



Nach Verschütten/Auslaufen: Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Feuer: Bei Brand vorhandene Feuerlöcher einsetzen. Wenn Löschversuch nicht sofort erfolgreich ist, Fenster und Türen schließen, Raum verlassen, Feuerwehr rufen **(112)**.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Wasserdampf.

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: Benetzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Bei Reizung Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Bei Reizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt: Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 09 01 04 Fixierlösungen

Ungereinigte Verpackung: Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.