

Betriebswasserentkeimung

Lösung zur viruziden Abschluss-desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Lichtleiter, Polymerisationslampen, Köpfe von Intraoralkameras/-scanner, sowie zur Desinfektion/Aufbereitung von Tuchspenderboxen und Druckflaschen (1 - 1,5 L) unabhängiger Betriebswasserversorgungssysteme wie z. B. das ALPRO-BCS (BottleCareSystem).



CE 0123

Zusammensetzung

Natriumhypochlorit-Lösung mit 1 – 2 % Aktivchlor.

Wirkungsspektrum

▪ bakterizid	10 min.
▪ levurozid	10 min.
▪ sporizid	10 min.
▪ viruzid	5 min.

Anwendungskonzentrationen

Testkriterien: Geringe Belastung, Raumtemperatur:

- sporizid (prEN 17126) gegen Bacillus subtilis	10 Minuten
- viruzid (EN 16777) gegen Parvoviren	5 Minuten

Hinweis:

Vordesinfektion mit TB-wirksamen Desinfektionsmittel.

Anwendung

- **Viruzide Abschlussdesinfektion**
Nach Vorreinigung und allgemeiner Desinfektion (z. B. mit **PlastiSept eco Wipes/MinutenWipes**), geeignetes Zellstofftuch mit unverdünntem **BC-San 100** tränken, die zu desinfizierenden Oberflächen gründlich abwischen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Zellstofftuch nach dem Gebrauch entsorgen.

- **Tuchspenderboxen**
Geeignetes Zellstofftuch mit unverdünntem **BC-San 100** tränken, alle Innen – und Außenflächen der Spenderbox (einschließlich Deckel) auswischen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Zellstofftuch nach dem Gebrauch entsorgen.
- **Druckflaschen von Betriebswasserversorgungssystemen**
Flascheninhalt (100 ml) von **BC-San 100** in die leere Druckflasche geben und diese bis zum Gewindeansatz mit Trinkwasser füllen. Die Lösung in der Druckflasche mindestens 6 Stunden (z. B. über Nacht) einwirken lassen. Während der Desinfektion die gefüllte Druckflasche verschlossen im Aufbereitungsraum aufbewahren oder wie gewohnt an der Aufnahme des Betriebswasserversorgungssystems befestigen.

Achtung

Während der Desinfektion keinen Druck auf die Druckflasche geben!

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal. Nicht geeignet für unlegierte Metalle.

Betriebswasserentkeimung

Wiederinbetriebnahme

Vor der Wiederinbetriebnahme des Betriebswasserversorgungssystems den Inhalt der Druckflasche über das Abwasser entsorgen. Anschließend die desinfizierte Druckflasche zu $\frac{1}{3}$ mit Trinkwasser befüllen, schütteln und entleeren. Diesen Vorgang 1-mal wiederholen. Anschließend die Herstellerangaben des Betriebswasserversorgungssystems befolgen.

Haltbarkeit

2 Jahre

Lieferformen

REF 3199 12 x 100 ml Flasche im Karton

Gutachten

HygCen Germany GmbH:

- EN 16777 (Viruzidie Wirkung) 2019-02
- prEN 17126 (Sporizidie und mikrobizidie Wirkung) 2018-11

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.