

# Hygienischer Aufbereitungs- und Befüllungsplan für praxis direkt - Tuchspender-Systeme

## Erstbefüllung



1

Zum Personalschutz, sowie zum Schutz der **VLIESTÜCHER** vor Kontaminationen empfehlen wir die Arbeitsfläche z. B. mit **microsept® FD** vorher zu desinfizieren. Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhe tragen!



2

Öffnen Sie den Deckel des Feuchttuchspenders und setzen Sie die entpackte Vliestuchrolle oder den Beutel mit den vorgetränkten Vliestüchern in den Spender ein. Ziehen Sie das innerste Vlietuch ein kleines Stück aus der Mitte heraus.



3

Anschließend gießen Sie 1,5 bis 2,5 Liter gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung **microsept® FD** langsam spiralförmig von der Mitte nach außen über die Vliestuchrolle. Dadurch gewährleisten Sie eine vollständige Benetzung. (**Schritt entfällt bei vorgetränkten Tüchern.**)



4

Nun ziehen Sie das innerste Vlietuch der Vliestuchrolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Deckels ein.



5

Setzen Sie den Deckel auf den Spender auf und verschließen Sie ihn jetzt bis er einrastet.



6

Verschließen Sie auch die Schutzkappe des Entnahmesystems sorgfältig.



7

Nach ca. 30-60 Minuten Wartezeit sind die Vliestücher vollständig durchtränkt und einsatzbereit. (**Schritt entfällt bei vorgetränkten Tüchern.**)



8

Füllen Sie das Chargenetikett, das jeder Vliestuchrolle beigelegt ist, vollständig aus und kleben Sie es erkenntlich auf den Spender.



9

Das **Tuchspender-System** von praxis direkt ist nun einsatzbereit. Bei **microsept® FD** beträgt die Standzeit 28 Tage.

Zur Standzeitkontrolle bringen Sie wie folgt den mitgelieferten **Timestrip®** als Kontrollsystem auf:



1

Entfernen Sie die Schutzfolie des Timestrip® auf dessen Rückseite.



2

Kleben Sie den Timestrip® auf den Deckel und aktivieren Sie den Timestrip® mit Fingerdruck, somit lösen Sie den Zeitindikator aus.



3

Gefahrloser Farbstoff wandert entlang des Anzeigefensters und zeigt Ihnen die verbleibende Standzeit an. Dauer 28 Tage.

**Aufbereitung des Spendereimers vor Wiederbefüllung:**

Leeren Nachfüllbeutel, eventuelle Desinfektionsmittelsreste laut Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Deckel und Eimer vor Neubefüllung gründlich reinigen um etwaige Verschmutzungen und Rückstände zu entfernen. Mit **microsept® FD** den Deckel und Eimer vollständig benetzen und unter Beachtung der Einwirkzeit mindestens 30 Sekunden (siehe Einwirkzeiten) einwirken und trocknen lassen. Nach dem manuellen Aufbereitungsverfahren kann der Eimer wieder befüllt werden.

VAH Mitteilung Hyg med 2012; 37 - 11  
VAH Mitteilung Hyg med 2014; 39 - 9

