

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 13.04.2021

**Gebrauchsfertige Lösung zur
Desinfektion (Innen- und Außenflächen)
von ärztlichen und zahnärztlichen
Hohlkörperinstrumenten.**

WL-cid ist ein Medizinprodukt der Klasse IIb. Die Desinfektionsleistung wurde entsprechend dem Anforderungskatalog der VAH/DGHM zur Instrumentendesinfektion unter praxisnahen Bedingungen am Instrument durch Gutachten belegt.

- **schnelle Wirksamkeit**
- **gute Materialverträglichkeit**
- **unterstützende Reinigungswirkung**
- **kostengünstige Anwendung**
- **aldehyd- und phenolfrei**
- **VAH/DGHM zertifiziert**



CE 0123

Zusammensetzung

60 % Alkohol (Ethanol, Isopropanol),
< 0,1 % QAV, tert. Alkylamin, Chlorhexidin

Wirkungsspektrum *

- *bakterizid inkl. mykobakterizid, geeignet zur Hospitalismusprophylaxe*
- *fungizid*
- *viruzid gegen unbehüllte Viren z. B. Noro-, Adeno-, Polio- und Polyomaviren (SV 40), sowie alle behüllten Viren wie z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza sowie Coronaviren*

Einwirkzeit *

bakterizid (EN 13727, EN 13697, VAH-Methode 14.1)	5 Min.
fungizid (EN 13624, EN 13697, EN 17387)	5 Min.
levurozid (VAH-Methode 14.1)	5 Min.
tuberkulozid (EN 14348, EN 13697, VAH-Methode 14.1)	5 Min.
mykobakterizid (EN 14348, EN 17387)	5 Min.
viruzid (EN 14476, EN 16777) gegen unbehüllte und behüllte Viren	5 Min.

viruzid gemäß der Stellungnahme von RKI, DVV, GfV und VAH „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-medizinischen Bereich“ (2017)

*nach Vorreinigung mit WL-clean

Gutachten*¹

- HygGen, Schwerin, Prof. Dr. H.-P. Werner, VAH, EN 16777 + EN 14476, Viruzid gegen unbehüllte Viren z. B. Adeno-, Noro- und Polioviren und behüllte Viren z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza, 2018-09; EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, VAH 14.1, viruzide Wirksamkeit, 2019-03
- Labor Enders, Stuttgart, PD Dr. M. Eggers, SV 40 EN 14476, 2019-02; Polio EN 14476, 2019-02; MNV EN 14476, 2019-02; Adeno EN 14476, 2019-02; MNV EN 16777, 2019-02; Adeno EN 16777
- iki-Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GmbH, Giessen, PD Dr. F.-A. Pitten VAH 14.1, 2018-12; prEN 17387, 2019-09; EN 13624 + EN 14348, 2019-08
- HygGen, Schwerin, Dr. S. Werner, bakterizide + levurozide Wirkung, 2020-01; tuberkulozide Wirkung, 2020-01

*¹Testkriterien: Raumtemperatur, geringe Belastung

Zur Instrumentenaufbereitung

Stand: 13.04.2021

Gutachten WL-System (WL-clean und WL-cid)

- CleanControlling, Liptingen, Reinigungsvalidierung, 2017-08

Freigaben

zur Spraykanalaufbereitung (Wasser und Luft):
u.a. von W&H Dentalwerke, Dentsply Sirona.

zur kompletten Aufbereitung aller Innenflächen:
u.a. von SciCan, NSK, KaVo, Morita.

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.

Anwendungsgebiet

Desinfektion aller Medienwege und Innenflächen von Hand- und Winkelstücken einschließlich Turbinen nach der nicht protein-fixierenden Vorreinigung mit WL-clean.

Achtung: Nur Adapter gemäß Anwendungs-freigaben der Instrumentenhersteller verwenden

Haltbarkeit

3 Jahre

Anwendung

WL-cid wird mit spezifischen ALPRO-Adaptern nach der Reinigung mit **WL-clean** angewendet. Das Instrument nach jeder Reinigung mit WL-clean für mindestens **2 x 3 Sekunden** mit **WL-cid** durchspülen und **5 Minuten** einwirken lassen.

Die ausgespülte Lösung nicht wiederverwenden.

Anschließend Trocknung der Innenflächen mit **WL-dry** oder mit **WL-Blow** (Sprühdauer mind. **2 x 3 Sekunden**).

Im Anschluss hat eine Pflege gem. Herstellerangaben (mit geeignetem Pflegeöl) zu erfolgen.

Die Dose während der Anwendung immer senkrecht halten.

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

Lieferformen

REF 4141	Kombipackung 1 x 500 ml Sprühdose WL-cid 1 x 300 ml Sprühdose WL-dry 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4140	Klinikpackung 4 x 500 ml Sprühdose WL-cid 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4144	WL-Blow StarterSet 2 x 500 ml Sprühdose WL-clean 2 x 500 ml Sprühdose WL-cid 1 x WL-Blow 1 x Gebrauchsanweisung
REF 4147	WL-dry StarterSet 2 x 500 ml Sprühdose WL-clean 2 x 500 ml Sprühdose WL-cid 2 x 300 ml Sprühdose WL-dry 1 x Gebrauchsanweisung