



Konzentrat zur Desinfektion mit exzellenter Reinigungsleistung.

Anwendungsbereiche:

Descocid®-N erzielt bereits in niedrigen Anwendungskonzentrationen eine verlässliche Wirkung und ist dadurch besonders wirtschaftlich. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Materialverträglichkeit (enthält Korrosionsinhibitoren) und einen dezenten, angenehmen Geruch aus.

Descocid®-N eignet sich zur Reinigung und routinemäßigen Wischdesinfektion von Medizinprodukten, medizinischen Oberflächen im Patientenumfeld mit häufigem Hand- und Hautkontakt wie Bettgestelle und Matratzenbezüge, Nachttische, Tragen, OP-Tische, Untersuchungs- und Verbandswägen sowie die Oberflächen medizinischer Geräte in allen Funktionsbereichen des Krankenhauses, in Arzt und Zahnarztpraxen sowie in Sekundärbereichen der Humanmedizin.

Besondere Eigenschaften:

- für den Einsatz in den Tuchspendersystemen **A⁰-Wipes** und **Kimtech* Wettask* DS** bis zu 28 Tage geeignet
- hervorragende Reinigungsleistung
- inkl. Kalk- und Fettlösekräft
- äußerst wirtschaftlicher Einsatz
- kein Klebeeffekt

Listung:

- VAH-Liste
- IHO-Liste (Lebensmittelhygiene)

Anwendungsempfehlung:

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
VAH – Flächendesinfektion mit Mechanik		
VAH – Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid	1,0%	15 Min.
hohe organische Belastung (äquivalent zu EN 16615)	0,5%	30 Min.
EN-Methoden – Flächendesinfektion ohne Mechanik in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen		
EN 1276 (Phase 2 / Stufe 1) – bakterizid	0,25%	5 Min.
hohe organische Belastung		
EN 1650 (Phase 2 / Stufe 1) – levurozid	0,1%	5 Min.
hohe organische Belastung		
EN 13697 (Phase 2 / Stufe 2) – bakterizid	2,0%	5 Min.
hohe organische Belastung		
EN 13697 (Phase 2 / Stufe 2) – levurozid	1,5%	5 Min.
hohe organische Belastung	0,25%	15 Min.
DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung		
begrenzt viruzid* (inkl. HIV / HBV / HCV)	1,0%	15 Min.
Vacciniavirus	1,0%	15 Min.
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	0,25%	15 Min.

*gemäß DVV / RKI-Stellungnahme, Bundesgesundheitsblatt 3/2017

Anwendung:

Flächendesinfektion mit Mechanik; Scheuer-Wischdesinfektion: Konzentrat je nach Anwendung mit Wasser verdünnen. Eine ausreichende Menge (Nass-Wischen) der angesetzten Gebrauchslösung durch eine Scheuer-Wisch-

Desinfektion auf die Oberfläche aufbringen und mechanisch verteilen. Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Tel.: +49 30 77992-200
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

Vertrieb in Österreich (Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001: 2015):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1090 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Flächendesinfektion ohne Mechanik gemäß

EN-Methoden: Konzentrat je nach Anwendung mit Wasser verdünnen. Oberfläche vollständig mit der angesetzten Gebrauchslösung benetzen und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen. Lebensmittelberührende Oberflächen sind nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser von mindestens Trinkwasserqualität nachzuspülen.

Starke Verunreinigungen durch z. B. Blut, Erbrochenes o. ä. sind vor der Desinfektion mechanisch zu entfernen.

Angesetzte Desinfektionsmittellösungen dürfen nicht über längere Zeit offen stehen bleiben und sind gemäß VAH- und RKI-Empfehlungen mindestens arbeitstäglich zu erneuern.

In Kombination mit dem Tuchspendersystem

A⁰-Wipes: Descocid®-N kann mit einer Standzeit von bis zu 28 Tagen im Tuchspendersystem A⁰-Wipes unter Beachtung der besonderen Hinweise zur Handhabung eingesetzt werden. Bitte beachten Sie des Weiteren die Hinweise auf dem Produktinformationsblatt der A⁰-Wipes sowie die VAH-Empfehlungen zum sachgerechten Gebrauch und zur Aufbereitung von Tuchspendersystemen.

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 g enthalten:

- 13,2 g Benzalkoniumchlorid
- 6,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid
- 4,5 g Ameisensäure

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid*

Besondere Hinweise:

- Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden.
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen (gem. BGW).
- Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung beachten.
- Nicht mit anderen Präparaten mischen (z. B. anionische Tenside, starke Basen, Oxidationsmittel).
- Bitte beachten Sie die RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (BuGBI 10/2022) sowie die Empfehlung des VAH und IHO zur Flächendesinfektion!
- Eine exakte Dosierung ist Voraussetzung für eine wirksame Desinfektion. Zur exakten Dosierung beim Ansetzen der Gebrauchslösung Dosiertabelle und Dosierbecher, -pumpen oder -geräte zu Hilfe nehmen.
- Kein heißes Wasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
- Auf eine ausreichende Belüftung achten, v. a. bei großflächiger Ausbringung.
- Nicht auf Säureempfindlichen Materialien (Marmor, Aluminium) anwenden.

Physikalische und

chemische Eigenschaften:

Aussehen: klare, grüne Flüssigkeit
Geruch: angenehm
pH-Wert: ca. 1,5 bei 20 °C
Dichte: ca. 0,985 g/cm³ bei 20 °C
Flammpunkt: 34 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

- Karton mit 6 x 1 L Dosierflaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern
- 1 x 10 L Kanister

zusätzlich lieferbar:

- diverse Dosierhilfen zum Aufschrauben auf Flaschen und Kanister

Das Präparat wird hergestellt in Übereinstimmung mit dem internationalen Qualitätssystem EN ISO 13485.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Flächendesinfektionsmittel für Medizinprodukte gem. EU-Verordnung 2017/745 „Medizinprodukteverordnung“.

CE 0482

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-12247 Berlin, Kaiser-Wilhelm-Str. 133
Tel.: +49 30 77992-200
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

Vertrieb in Österreich (Das Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001: 2015):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1090 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at